

صحت

دستور العمل استفاده از تست سریع آنتی ژن Covid-19 (کرونا).

مادل: ای سی و-۳۰۰۰

این محصول توسط سازمان غذا و دارو (FDA) تایید نشده است، اما توسط سازمان غذا و دارو برای استفاده اضطراری مجاز است. لطفاً قبل از انجام آزمایش برای استفاده، تمام دستور العمل های این راهنما را بخوانید.

اپلیکیشن را دانلود کنید و سپس آن را باز کنید

برای دانلود برنامه "iHealth Covid-gen 19 Anti Rapid test" روی تلفون هوشمند خود (+ ios12.0، + Android) کد QR را اسکن کنید. لیست کامل ذیل را برای تلفون های هوشمند مشاهده کنید



<https://ihealthlabs.com/pages/support-ICO3000>

ثبت نام کنید و وارد برنامه شوید و در اپلیکیشن ویدیو را ببینید


هر مرحله یک ویدیو آموزشی در برنامه دارد. ویدیو را تماشا کنید و طبق دستور العمل تست را انجام دهید.

دستور العمل مرحله وار "گام به گام"

1. آماده سازی مواد

بسته را باز کنید، کارت تست COVID-19 را از قوطی بکشید، لوله را با بافر استخراج و سواب را پر کنید. وقتی برای آزمایش آماده شدید، قوطی کارت تست COVID-19 را باز کنید.

extraction buffer¹ او swab²

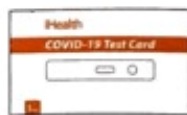

¹ یو شخص یا شی چی نامناسب یا مخالف خلک یا شبان د یو بل سره د تماس یا زیان رسولو مخه نیسی.
² د موادو یوه توتیه چی په جراحی او درمل کی د زخمونو پاکولو، د درملو کارولو، یا نمونو اخیستلو لپاره کارول کیږي.

2. نمونه جمع آوری کنید

الف: سواب (swab) را از قوطی خارج کنید، متوجی باشید که سر سواب (swab) را لمس نکنید، لطفاً قوطی سواب را برای استفاده بعدی نگه دارید.




ب: به آرامی تمام قسمت جذب سواب (swab) که (معمولاً 2/1 تا 4/3 اینچ) می باشد را داخل سوراخ بینی تان کنید



توجه: در کودکان، حداکثر عمق ورود به بینی ممکن است کمتر از 4/3 اینچ باشد و ممکن است به شخص دیگری نیاز داشته باشید که سر کودک را در حین عبور از سواب کومک کند.

ج: داخل بینی (دیوار بینی) را به آرامی حداقل 5 بار حرکت دهید و به آرامی بینی را مسواک بزنید. حداقل 15 ثانیه برای جمع آوری نمونه وقت بگذارید و حتماً آب بینی را در سواب جمع کنید.

با استفاده از همان سواب (swab)، همان روش را برای جمع آوری نمونه از سمت دیگر بینی تکرار کنید. حتماً هر دو سوراخ بینی را با سواب (swab) مسواک بزنید

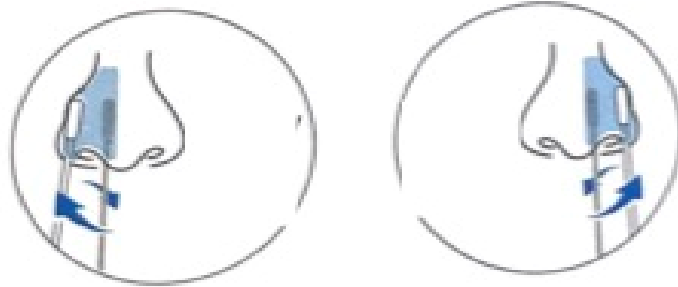


3. پروسس کردن نمونهها

لوله را به صورت عمودی روی میز قرار دهید، و کلاهک نارنجی بزرگ را بچرخانید تا لوله باز شود.



ب: سواب (swab) را داخل تیوب (لوله) قرار دهید، اخراً تیوب (لوله) را با نوک سواب (swab) لمس کنید و حداقل به مدت ۱۵ دقیقه باهم تکان بدهید

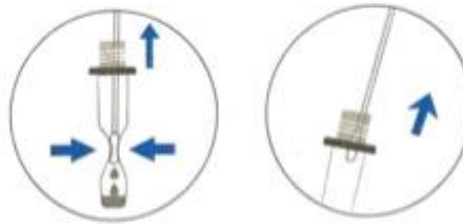

ج: دو طرف تیوب (لوله) را فشار دهید تا حد امکان مایع از سواب (swab) خارج شود و سپس سواب را بردارید.

توجه: اگر سواب را فشار ندهید، ممکن است مواد کافی برای انجام آزمایش درست وجود نداشته باشد، به عنوان مثال: احتمال اشتباه و نتیجه منفی دادن بیشتر است.

د. پوش بزرگ نارنجی را ببندید، سواب را دوباره داخل قوطی قرار دهید و با راحت سواب و قوطی را دور کنید.



4. نمونه را اضافه کنید
دهانه کوچک سفید لوله را بچرخانید تا باز شود. 3 قطره از نمونه را به کارت تست COVID-19 اضافه کنید.
قسمت بالای سفید کوچک را دوباره بند کنید.



نوت: اگر مقدار کمی ماده به کارت تست اضافه شود ممکن است نتیجه کاذب و منفی بدهد.


5. 15 دقیقه منتظر باشید
بلافاصله پس از افزودن نمونه، با کلیک بر روی دکمه "شروع تایمر" در قسمت نمونه، زمان را شروع کنید.
نتیجه در 15 دقیقه آماده خواهد شد



توجه: تا زمانی که 15 دقیقه کامل نشده باشد، در مورد نتایج آزمایش خود اظهار نظر نکنید، زیرا ممکن است تا 15 دقیقه طول بکشد تا خط T ظاهر شود.

6. نتیجه را بخوانید

نتایج نباید بعد از 30 دقیقه خوانده شود (نتایج باید با بزرگنمایی 2 برابر نمایش داده شوند)

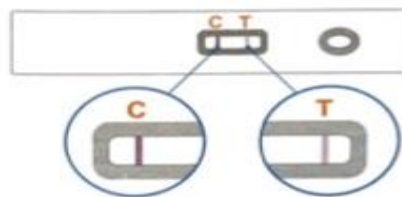

توجه: خط T می تواند بسیار ضعیف باشد

7. نتایج آزمایش را توضیح دهید

نتیجه مثبت



یک نتیجه مثبت باید هم خط C و هم خط T را نشان دهد. نتیجه مثبت به این معنی است که آنتیجین ویروس کووید 19 شناسایی شده است و نتیجه فرد مثبت کووید 19 است.

در زیر عکس هایی از آزمایشات مثبت اصلی آورده شده است. لطفا توجه داشته باشید که خط T ممکن است ضعیف باشد



کسانی که آزمایش آنها مثبت است باید خود را جدا (کرنتین) کنند و برای آزمایشات و دستورالعمل های بیشتر با داکتر یا ارائه دهنده مراقبت های خود مشوره کند زیرا آزمایش های اضافی و گزارش صحت عمومی مورد نیاز است.

نتیجه منفی:

نتیجه منفی فقط خط C را نشان می دهد. نتیجه منفی به این معنی است که هیچ آنتیجین ویروس COVID-19 شناسایی نشده است و فرد مریض مبتلا به کرونا یا کووید 19 در نظر گرفته نمی شود.



• لطفاً توجه داشته باشید که نتایج منفی، کووید-19 را رد نمی کند.

در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش: تمام توصیه های فاصله اجتماعی را رعایت کنید و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهید.

شک مریضی اگر ادامه داشت و/یا اولین آزمایش شما منفی بود، آزمایش را بعد از 1 تا 2 روز تکرار کنید و با ارائه دهنده مراقبت های صحت خود به در محل تان یا در مرکز COVID-19 مشوره کنید.

توجه: نتیجه منفی فرضی است و با تست مولکولی تایید می شود، در صورت نیاز برای مدیریت مریض قابل انجام است. کسانی که علائم منفی دارند باید در عرض حداقل 24 ساعت و حداکثر 48 ساعت بین آزمایشات، مجدداً معاینه شوند.

با یک سنجش مولکولی نتیجه فرضی منفی و تاییدی است، در صورت لزوم، برای مدیریت مریض ممکن است انجام شود.. فرد بدون علامت که تست منفی داشته باشد دوباره با حداقل 24 ساعت و نه بیشتر از 48 ساعت بین آزمایشات آزمایش شود.

آزمایش تاییدی اضافی با آزمایش مولکولی برای نتایج منفی ممکن است پس از نتایج منفی دوم برای مریضان بدون علامت، مانند فردی که در تماس نزدیک با کووید-19 یا مشکوک به کووید-19 یا در جوامع با شیوع بالای مریضی است، ضروری می باشد.

در صورتی که احتمال عفونت SARS-CoV-2 کم باشد، مانند افرادی که در مرض شناخته شده SARS-CoV2 قرار نگرفته اند یا در جوامعی با شیوع کم عفونت زندگی می کنند، ممکن است آزمایش تاییدی اضافی با آزمایش مولکولی برای نتایج مثبت نیز ضروری باشد.

نتیجه بی اعتبار



اگر خط وجود نداشته باشد، یا اگر خط T وجود داشته باشد، آزمون بی اعتبار است. نتایج بی اعتبار به این معنی است که تست به درستی نتیجه نداده است. شما باید با یک کیت تست جدید دوباره تست کنید. اگر پس از آزمایش مجدد، نتیجه آزمایش همچنان بی اعتبار بود، با داکتر یا مرکز محلی کووید 19 تماس بگیرید. نتیجه بی اعتبار نشان نمی دهد که فرد مبتلا به کووید 19 بوده یا نه و باید تکرار شود.

8. کیت تست را از بین ببرید

پس از اتمام تست، اجزای کیت را در سطل زباله بیندازید.

9. نتیجه آزمایش را گزارش کنید

نتیجه را طبق دستورالعمل برنامه گزارش دهید یا نتیجه آزمایش خود را با ارائه دهنده مراقبت های صحت خود به اشتراک بگذارید.

در ایالات متحده آمریکا:

این آزمایش به عنوان کمکی برای تشخیص کلینیکی مرض های COVID-19 فعلی استفاده می شود، از این آزمایش به عنوان مدیریت بیماری خود استفاده نکنید. این محصول توسط سازمان غذا و دارو (FDA) تایید نشده است. اما توسط سازمان غذا و دارو برای استفاده اضطراری مجاز است. این محصول فقط مجاز به تشخیص پروتئین های SARS-CoV-2 است، نه به هر گونه ویروس یا مریضی دیگری. استفاده اضطراری از این محصول فقط برای مدت زمان حاوی شرایط می باشد، مجاز است، 564 (ب) (1) مجوز استفاده اضطراری را برای تشخیص لابراتوار برای تشخیص و/یا تشخیص کووید-19 ترجیح می دهد، مگر اینکه اعلامیه لغو شود، یا مجوز فوراً لغو شود.